

Rafys

SCHOUDERKLACHTEN DEEL 1



Nieuw



Schouderklachten?

Dat is lastig. Met onze speciale moderne mitella geeft u de schouder direct 100% rust en worden de pijnklachten minder. Zeker in combinatie met een pijnstillende hot/cold pack.

Heeft de schouder alleen een beperkte rust nodig dan is onze enkele of dubbele PSI een mogelijkheid. Hiermee kan u de schouder gewoon blijven gebruiken. U kunt niet meer in de eindstanden komen, waardoor uw schouder de nodige rust krijgt om te genezen. Tevens leert de PSI u de schouder actief en veilig te gebruiken.

Ook onze schouder oefenhulpmiddelen voor thuis zijn uniek en eenvoudig om bijvoorbeeld uw schouder soepel of sterker te maken c.q. te houden.

**De Rafys Producten zijn verkrijgbaar
via Blessurotheek, apotheek of bandagist**

RAFYS België, Jan Van Rijswijcklaan 290, B- 2020 Antwerpen



Schouderklachten zijn een typisch voorbeeld van blessures die steeds verergeren. Heffen, duwen en trekken, dagdagelijkse bewegingen die zo vanzelfsprekend zijn, worden plots een ganse opgave. Beperking van de lastarm hand- schouder zal het schoudergewricht ontlasten.



1. PSI Partiële Schouder Immobilisator

De Rafys PSI bestaat uit 2 textielbanden van 3cm breed:

- * een armlus
- * een borstband

Selectief instelbaar d.m.v. klitbandsluiting.

Beperking van de abductie, anteflexie enretroflexie.



2. PSBI Partiële SchouderBlad Immobilisator

De Rafys PSBI bestaat uit een schouderlus en borstband in neopreen. Met de PSBI kan protractie van het schouderblad worden afgeremd.

Herpositionering van het schouderblad.

3. AC Brace Acromio Claviculaire Brace

Als bij een **acromio/claviculaire** distorsie het 'pianotoets' fenomeen aanwezig is en dit moet worden tegengegaan kan deze Acromio Claviculaire Brace een nuttige rol vervullen.

Met behoud van volledige armfunctie kan op twee wijzen een neerwaartse druk op het clavicula worden uitgeoefend (zie afbeelding 1 onder en boven).

Een ezelsbruggetje bij het aanleggen is te beginnen in de andere oksel en van daaruit de AC Brace over het neer te drukken clavicula laten verlopen.





4. SCHOUDERBRACE MultiFuntioneel

De Rafys SchouderBrace MultiFunctioneel bestaat uit een brede band in neopreen.

Deze wordt hier als Anti Dislocatie Brace gebruikt en bestaat uit een brede elastische band (1) en een smalle niet-elastische band (2).

In combinatie wordt de meeste tegendruk op de schouderkop uitgeoefend. Als het dislocatiegevaar verminderd is, kan de brede elastische bandage alleen worden gedragen.

Beide bandages lopen van de achterkant van de arm onder de oksel door naar A en van A naar D over de voorzijde van de schouderkop om daar de nodige tegendruk te geven en vervolgens via de rug achterlangs naar B en van B over de schouderkop naar C. De brede band sluit op zichzelf bij C en de smalle band gaat bij C door een ring en sluit bij E.

Te gebruiken als: Mitella, PSI, PSBI, Anti Dislocatie Brace en Bovenbeen brace.




5. AD Brace Anti Dislocatie Brace

Vaak is alleen de brede elastische neopreenband voldoende om het gewenste tegendrukeffect op het caput humeri te krijgen.

De Rafys Anti Dislocatie Brace wordt gebruikt om de dislocatie naar voren door extensie bewegingen tegen te gaan. De AD Brace geeft enerzijds tegendruk en anderzijds wordt de extensiebeweging tegengegaan.

De AD Brace loopt van de achterkant van de arm onder de oksel door naar A en van A naar B over de voorzijde van de schouderkop om daar de nodige tegendruk te geven en vervolgens via de rug achterlangs naar C en van C over de schouderkop naar D. De brede band sluit op zichzelf bij D. Door de bandage bij D meer of minder laag te laten sluiten wordt de extensie meer of minder sterk afgeremd.

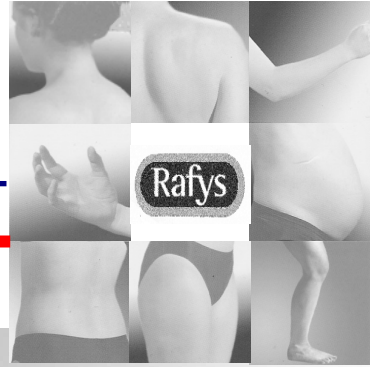

6. SCHOUDER OEFENKATROL

Is een katrol met een touw en handgrepen aan de uiteinden, voorzien van een deuranker als fixatiepunt.

Onderhouden van de bewegelijkheid van het gewricht zonder te belasten.



7. THUIS TRACTIE Schouder, Elleboog, Pols

De Rafys Thuis Tractieset is een polsmanchet met schuimvoering en klitband sluiting, voorzien van een deuranker en veerbalans.

Tractie van het gewricht zowel voor de praktijk als in de thuissituatie.

Verkrijgbaar bij:

Meer info

Vraag raad in de
BlessuroTheek

of bij **Rafys België**

E info@ergomedics.be

T 03 257 03 58

F 03 238 80 09